

Anvisning för rengöring av provpessar på barnmorskemottagning

Anvisningen gäller för alla typer av provpessar: slidpessar Milex® och cervixpessar Femcap®. Provpessar för Caya är engångs enligt företaget.

Rengöring

Eftersom pessaret används på slemhinnan ska det vara höggradigt rent, dvs rengöras och desinfekteras mellan utprovningarna:

- Utför mekanisk rengöring med ljummet vatten, diskmedel och mjuk borste direkt efter användning för att avlägsna sekret.
- Diska därefter pessaret i diskdesinfektor eller autoklav. Placera pessaret så att hela produkten blir rengjord och desinfikerad.
- Plocka ur pessaren med rengjorda, spritade händer, låt torka och förvara pessaret i kärl med lock för att bevara renhetsgraden till nästa utprovning.

Alkohol eller vikronbad rekommenderas inte då det medför risk för att sekret och mikroorganismer ”bränner fast” i produkten. Provpessaret behöver inte steriliseras.

Faktaansvarig
Elisabeth Storck Lindholm, Överläkare, Mödrahälsovård

Referenser

Hygienläkare Ann Tammelin Vårdhygien Stockholm Strategiska Vårdgivarfrågor
Hygiensjuksköterska Mats Pergert Vårdhygien Stockholm Strategiska Vårdgivarfrågor

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Reviderat. 2021-12-14

Gäller tills vidare